



**UNIDENT**  
SWISS

## UNISEPTA® Light

Готовый к использованию безальдегидный раствор с низким содержанием спирта. UNISEPTA® Light обладает широким спектром активности и является эффективным дезинфектантом для поверхностей и медицинских приборов.

### Основные характеристики продукта:

- идеален для использования с материалами, чувствительными к спирту
- не оставляет разводов
- обладает нежным ароматом
- соответствует требованиям международной директивы CE и может использоваться с медицинскими приборами (директива 93/42/ЕЕС – класс IIa)
- соответствует Европейским стандартам
- насадка-спрей поставляется в комплекте с канистрой ёмкостью 1 л

### Состав продукта:

В 100 г UNISEPTA® Light содержится 22,6 г этанола, 0,064 г полигксаметилена бигуанида хлоргидрата, 0,053 г четвертичного аммония хлорида.

### Эффективен против:

- бактерий
- микобактерий туберкулёза (Tb)
- резистентного золотистого стафилококка
- кандид
- ВИЧ
- вируса гепатита В
- вируса гепатита С
- вируса герпеса
- ротавируса (15 минут)
- вируса гриппа H5N1 и H1N1



### Варианты поставки:

Канистра ёмкостью 1 л с насадкой-спреем  
Канистра ёмкостью 5 л



ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР В РОССИИ

ЮНИДЕНТ: +7 (495) 434-4601, fax +7 (495) 434-1020  
ЮНИДЕНТ-Поволжье: +7 (846) 979-8600, fax +7 (846) 979-8601  
www.unident.net e-mail: unident@unident.net



**UNIDENT**

## UNISEPTA® Light

### ПРОТОКОЛ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Перед использованием:  
Наденьте защитные перчатки

#### Показания к применению:

UNISEPTA® Light — готовый к использованию продукт для дезинфекции предварительно очищенных медицинских приборов. Убедитесь в том, что аппараты перед обработкой выключены из розетки.

#### Меры предосторожности:

Меры предосторожности указаны в паспорте безопасности и на этикетке продукта. Препарат классифицирован как опасный, в соответствии с требованиями Европейской Директивы 99/45/ЕЕС.

#### Соответствует европейским стандартам:

Бактерицидные свойства: EN1040, EN1276  
Фунгицидные свойства: EN1275, EN13624

#### Физические свойства:


Цвет	Бесцветный
Запах	Лёгкая отдушка
Хранение	При температуре от +5°C до +25°C
Срок годности	3 года
Контейнер	Изготовлен из пластика, пригодного для переработки



Убедитесь в том, что область обработки была предварительно очищена.



Равномерно распылите раствор по поверхности.

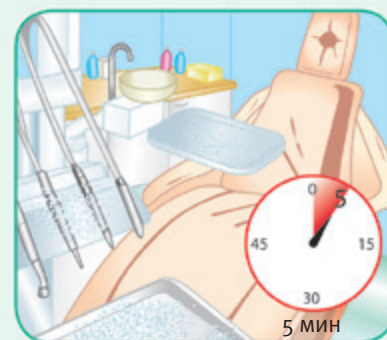

Оставьте раствор на поверхности на 5 минут. Не смывайте.



CE1253



ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР В РОССИИ

ЮНИДЕНТ: +7 (495) 434-4601, fax +7 (495) 434-1020  
ЮНИДЕНТ-Поволжье: +7 (846) 979-8600, fax +7 (846) 979-8601  
www.unident.net e-mail: unident@unident.net



UNIDENT