



UNIDENT
SWISS

VACUCID®

Концентрат тройного действия для стоматологических аспирационных систем. VACUCID® одновременно дезинфицирует, очищает и дезодорирует, при этом не пенится. Ежедневное применение позволяет избавиться от твёрдых отложений и предотвращает появление биоплёнки, помогает всегда держать аспирационную систему чистой, продезинфицированной и устраняет неприятные запахи.

Основные характеристики продукта:

- экономичный 2%-ный раствор
- разработан специально для ежедневного применения
- 5 литров концентрата VACUCID® хватит на 250 применений
- не содержит альдегида, фенола и хлорина
- соответствует требованиям международной директивы CE и может использоваться с медицинскими приборами (директива 93/42/ЕЕС – класс IIa)
- одобрен немецким обществом гигиены и микробиологии
- протестирован и отвечает требованиям европейских стандартов

Эффективен против:

- бактерий
- микобактерий туберкулёза (Tb)
- кандид
- ВИЧ
- вируса гепатита В
- вируса гепатита С



Состав продукта:

45,4 мг/г хлорида четвертичного аммония, 4 мг/г бигуанида, неионные и катионные поверхностно-активные вещества, вспомогательные вещества.

Варианты поставки:

Бутылка ёмкостью 1 л
Канистра ёмкостью 5 л

Средство применяется согласно СанПиН 2.1.3.2524-09, пункт 8.3.8.



ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР В РОССИИ

ЮНИДЕНТ: +7 (495) 434-4601, fax +7 (495) 434-1020
ЮНИДЕНТ-Поволжье: +7 (846) 979-8600, fax +7 (846) 979-8601
www.unident.net e-mail: unident@unident.net



UNIDENT

VACUCID®

ПРОТОКОЛ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Перед использованием:
Наденьте защитные перчатки

Показания к применению:

VACUCID® - концентрированный раствор для одновременной дезинфекции, очистки и дезодорирования аспирационных систем.

Меры предосторожности:

Меры предосторожности указаны в паспорте безопасности и на этикетке продукта. Препарат классифицирован как опасный, в соответствии с требованиями Европейской Директивы 99/45/ЕЕС. Для профессионального использования.

Соответствует европейским стандартам:

Бактерицидные свойства: EN1040, EN13727,
EN14561
Фунгицидные свойства: EN1275, EN13624,
EN14562

Физические свойства:


Цвет	Бледно-жёлтый
Запах	Лёгкая отдушка
pH	2,0 (концентрат)
Хранение	При температуре от +5°C до +25°C
Срок годности	Концентрат 3 года Неиспользованный раствор 7 дней
Контейнер	Изготовлен из пластика, пригодного для переработки



Приготовьте раствор VACUCID® (20 мл на 1 литр воды).



Пропустите 1 литр раствора через аспирационную систему.

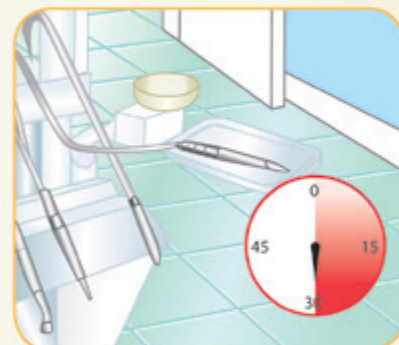

Оставьте раствор на 30 минут, можно оставить раствор на ночь.



Подготовьте как минимум 1 литр чистой воды.



Промойте аспирационную систему, пропустив через неё 1 литр чистой воды.



CE1253



ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР В РОССИИ

ЮНИДЕНТ: +7 (495) 434-4601, fax +7 (495) 434-1020
ЮНИДЕНТ-Поволжье: +7 (846) 979-8600, fax +7 (846) 979-8601
www.unident.net e-mail: unident@unident.net



UNIDENT